



Nouveau: un seul tube hépariné pour le test QuantiFERON®-TB Gold (QFT)

Prélèvement simplifié pour la recherche d'une infection tuberculeuse latente par le test QuantiFERON®-TB Gold (QFT)

JUSQU'À PRÉSENT

- 3 tubes spéciaux devaient être utilisés lors de la prise de sang.

Inconvénients:

- » fastidieux
- » problèmes de remplissage

DÈS MAINTENANT

- Prélèvement dans un seul (grand) tube hépariné (l'héparinate de lithium sert d'anticoagulant)



LES AVANTAGES

- » Prélèvement simplifié : 1 seul tube
- » Fin des problèmes de remplissage

DÉROULEMENT DU PRÉLÈVEMENT

- **1. Prélèvement le matin uniquement, du lundi au vendredi. Pas de prélèvement le samedi.**
- **2. Prise de sang dans un seul tube**
 - » Prélever min. 6 ml de sang
 - » Retourner plusieurs fois le tube pour bien mélanger le sang avec l'héparine
 - » Identifier le tube (étiquette ou nom, prénom et date de naissance)
 - » Attention: utiliser uniquement un tube hépariné: les autres anticoagulants peuvent causer des interférences avec le test.
- **3. Transport rapide au laboratoire**

Conserver le prélèvement à T° ambiante. **Ne pas réfrigérer !**
Le prélèvement doit impérativement parvenir au laboratoire dans les 4 heures qui suivent la prise de sang

QUE DEVIENNENT LES ANCIENS KITS DE 3 TUBES ?

- Vous pouvez dès maintenant effectuer vos prélèvements sur tube hépariné.
Si vous le souhaitez, vous pouvez encore utiliser vos anciens kits (3 tubes) jusqu'à la fin de l'année, ou nous les retourner.
Dès le 1^{er} janvier 2017, les kits de 3 tubes ne seront plus acceptés.

CONTACT

- Floriane de Marval, Dr ès Sc., Tél. 022 807 12 47